

INTEGRATED QUALITY FEEDBACK

iQF
Instruktor



HLW-Training



Gespeicherte
Ergebnisse

Ambu

Ambu® – IHR STARKER PARTNER

iQF, TRAINING THAT WORKS FOR LIFE

Alle Ambu-Trainingsgeräte werden kontinuierlich optimiert, um die stetig steigenden Anforderungen an das moderne und professionelle Training zu erfüllen.




TRAIN IQF, TRAIN FOR LIFE

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Feedbacksystemen zur Verbesserung der Ergebnisse bei BLS-Trainings, bieten wir nun ein hochwertiges Feedbacksystem für unsere BLS-Trainingsgeräte:

IQF - INTEGRATED QUALITY FEEDBACK.

Die iQF-Anwendung wurde sowohl für Auszubildende als auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder entwickelt. Sie bietet intelligente Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung und der Trainingsresultate der Auszubildenden beim Trainieren der HLW-Maßnahmen im Falle eines Herzstillstandes bei Säuglingen und Erwachsenen.

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der AHA- und ERC-Leitlinien, und um den neuesten Marktanforderungen gerecht zu werden, wurde ein "Upgrade-Kit" für bestehende Ambu BLS-Trainingsgeräte entwickelt.

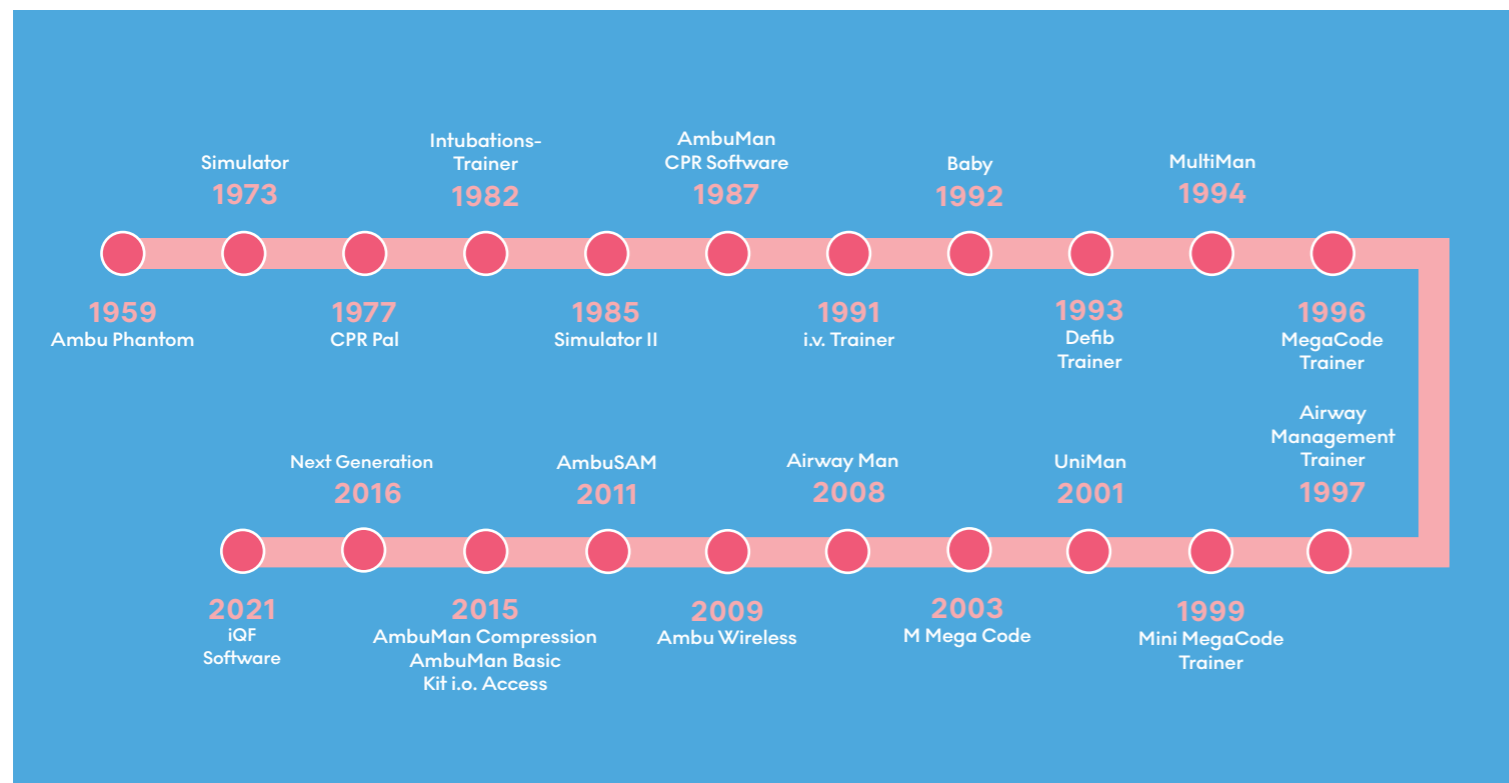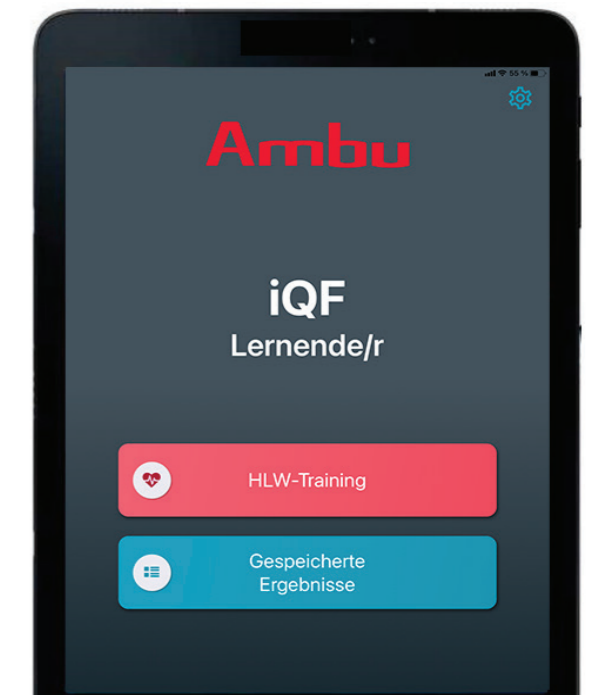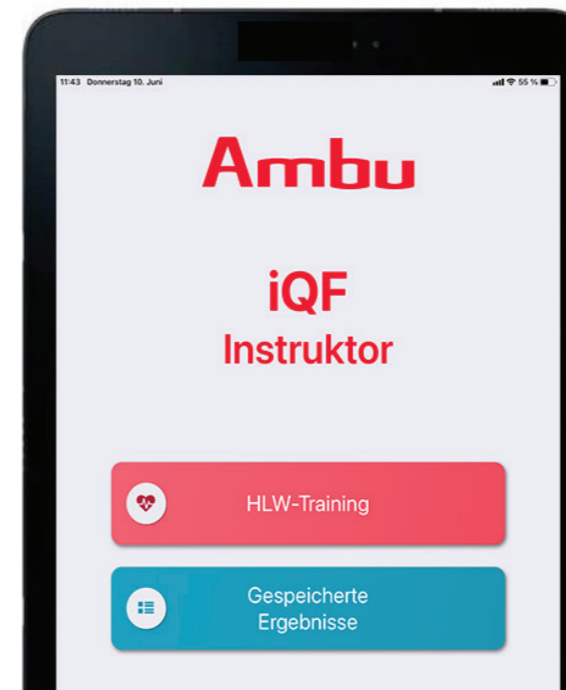

VERBINDEN SIE SICH IN SEKUNDENSCHNELLE MIT IHREM TRAININGSGERÄT

Trainieren Sie in interaktiver Weise gemäß der von AHA oder ERC vorgegebenen HLW-Parameter.

KOSTENLOSER DOWNLOAD

Laden Sie sich die kostenlose iQF App (Instruktor und/oder Trainee) auf iOS™ und/oder Android™ auf Ihr Tablet und erhalten Sie sofortigen Zugang zu Feedback und Debriefing.**

SCHNELLE UND STABILE VERBINDUNG

Verbinden Sie bis zu sechs Trainingsgeräte gleichzeitig via Bluetooth®-Verbindung.***

EINFACHE UND ÜBERSICHTLICHE EINSTELLUNGEN

Passen Sie Ihr HLW-Training nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHREN DATEN HERAUS

Speichern und prüfen Sie Ihre Trainingsergebnisse oder exportieren Sie sie in Excel, um Ihre Leistung im nächsten Training zu verbessern.

FÜR SIE, INSTRUKTOR

Die objektive Bewertung ermöglicht es Ihnen, jedem Trainee das beste Feedback zu geben.

Die Wettbewerbsfunktion sorgt beim Trainieren der perfekten HLW für Spaß und Abwechslung.

FÜR IHRE AUSZUBILDENDEN

Auszubildende können ihre Leistung sofort einsehen und erhalten unmittelbares Feedback zur Qualität ihrer HLW-Maßnahmen.

Durch das Feedback wissen die Auszubildenden jederzeit, wie sie ihre HLW-Maßnahmen korrigieren und optimieren können.

* iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern
 ** Android und Google Play Store sind Marken der Google LLC
 *** Bluetooth ist eine eingetragene Wortmarke der Bluetooth SIG, Inc.

AMBU iQF TRAININGSGERÄTE



AmbuMan® Basic iQF



AmbuMan® SAM iQF



Ambu® Baby iQF

EINE UNSCHLAGBARE KOMBINATION, UM QUALITÄT ZU ERREICHEN



Suche nach Geräten

- ERHALTEN SIE ECHTZEITINFORMATIONEN ZU JEDEM TRAINING.
- AMBU IQF WURDE DAZU ENTWICKELT, DAS ERREICHEN DER LERNZIELE VON INSTRUKTOREN UND IHREN AUSZUBILDENDEN ZU UNTERSTÜTZEN.
- DESHALB SIND SOWOHL EINE IQF-INSTRUKTOR-APP UND EINE SEPARATE IQF-TRAINEE-APP FÜR DIE AUSZUBILDENDEN VERFÜGBAR.
- STELLEN SIE MITHILFE DETAILLIERTER DATEN ZU KOMPRESSIÖN UND BEATMUNG DIE QUALITÄT DES TRAININGS SICHER.

Ambu iQF – UPGRADE KIT OPTION

Rüsten Sie Ihr Ambu Trainingsgerät auf

AmbuMan® Basic

AmbuMan® SAM

zu einem Ambu iQF Trainingsgerät

100%

AmbuMan® Basic iQF

100%

AmbuMan® SAM iQF

100%

HOLEN SIE FÜR IHRE AUSZUBILDENDEN DAS MAXIMUM AUS DEM TRAINING HERAUS UND GEBEN SIE BASIEREND DARAUF EIN NOCH PRÄZISERES UND FUNDIERTERES FEEDBACK!

WIE ERHALTEN SIE EIN HOCHWERTIGES HLW-TRAINING?

VERWENDEN SIE IHR TABLET ODER SMARTPHONE

Laden Sie die Ambu iQF-Instructor-App oder die Ambu iQF-Trainee-App für Android™ und/oder iOS™ herunter.

IN SEKUNDENSCHNELLE VERBUNDEN

Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Endgerät und schalten Sie Ihr Ambu iQF Trainingsgerät ein.

IHRE LEISTUNG AUF EINEN BLICK

Jede Beatmung und Kompression kann detailliert verfolgt werden.

DEBRIEFING

Basierend auf objektiven Daten, können Sie Ihren Auszubildenden das beste Feedback geben.

JETZT SIND SIE AN DER REIHE!

iQF APP FUNKTIONEN

Geben Sie optimales Feedback basierend auf objektiven Daten.

TRAIN iQF, TRAIN FOR LIFE

Legen Sie den Bildschirmstyp fest

Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Darstellung aus, die am besten zu Ihnen passt: Herz/Lunge, Liniendiagramm, Balkendiagramm, Perfusion - oder treten Sie im Wettbewerbsmodus „Läufer“ oder „Herzen“ gegeneinander an.

Legen Sie die Leitlinie fest




Sie können die Leitlinien, nach denen Sie trainieren wollen, ganz einfach selbst festlegen, egal ob ERC 2021 (Erwachsene/Säuglinge) oder AHA 2020 (Erwachsene/Säuglinge).

Legen Sie die Dauer fest

Passen Sie die Dauer der Trainingssitzung individuell nach Ihren Bedürfnissen an oder wählen Sie die Option „unbegrenzte Sitzung“ aus.

Legen Sie den HLW-Modus fest

Wählen Sie zwischen 1-Personen-HLW oder 2-Personen-HLW, nur Kompression oder nur Beatmung.

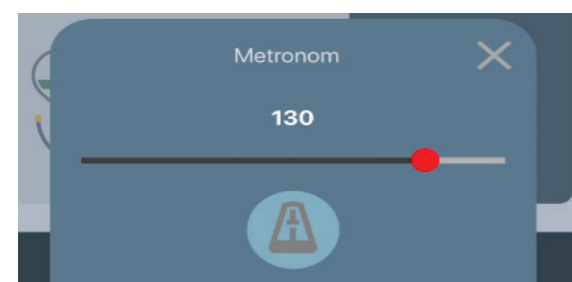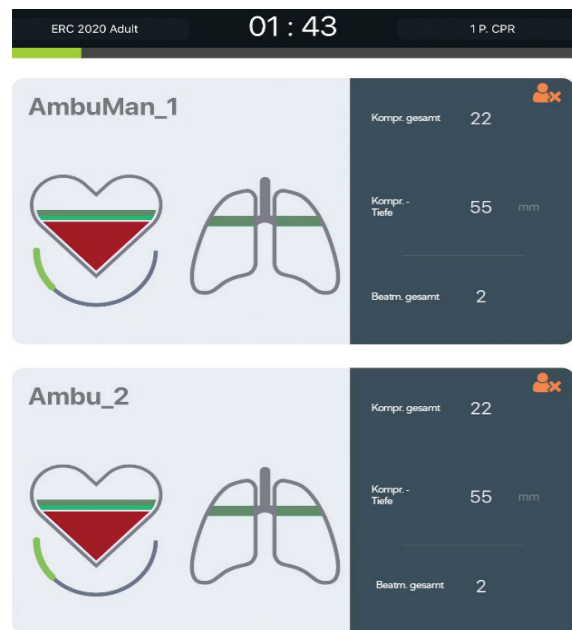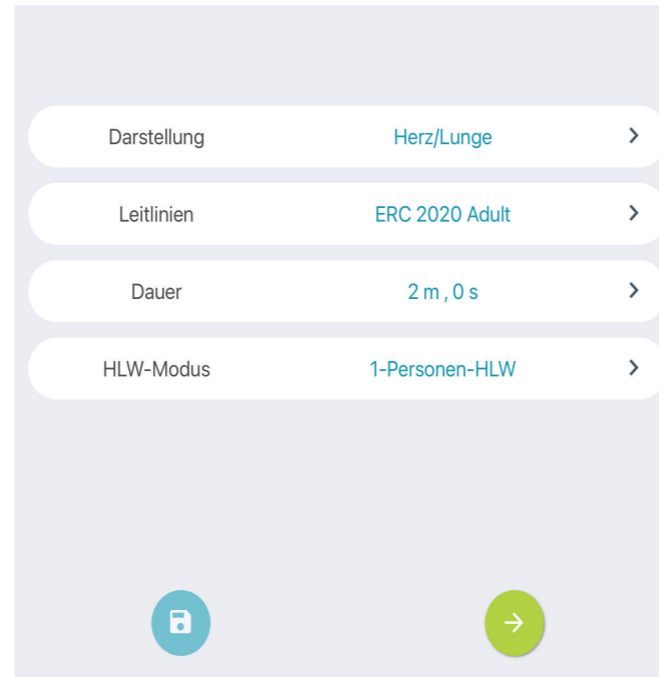

Starten Sie Ihr Training

Wählen Sie ein Trainingsgerät aus

Sobald Sie die Trainingseinstellungen vorgenommen haben, wählen Sie das Trainingsgerät aus, mit dem Sie trainieren möchten. Optional können Sie den Namen des Trainingsgerätes anpassen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sitzung zu starten:

- QUICKSTART:** Die Sitzung startet automatisch, sobald sie geladen wurde
- START:** Die Sitzung wird geladen und muss anschließend manuell gestartet werden.

Übersicht

Alle verbundenen Trainingsgeräte werden angezeigt

Durch das Anklicken eines der Trainingsgeräte in der Sitzungsübersicht gelangen Sie zur Detailansicht. Das Training kann jederzeit und beliebig oft pausiert und wieder gestartet werden.

Die Metronom-Funktion stellt sicher, dass die Kompression im korrekten Rhythmus erfolgt. Das Metronom können Sie auf die von Ihnen gewünschte Frequenz einstellen.

iQF APP FUNKTIONEN

Geben Sie optimales Feedback basierend auf objektiven Daten


Ergebnisse

Erhalten Sie alle detaillierten Trainingsergebnisse Ihrer Auszubildenden in der Ergebnisansicht.

Speichern der Trainingssitzung



Jede Sitzung kann abgespeichert, ausgedruckt oder in eine PDF-Datei umgewandelt werden.

Basierend auf den Ergebnissen, können Sie das Training der Auszubildenden stetig optimieren.

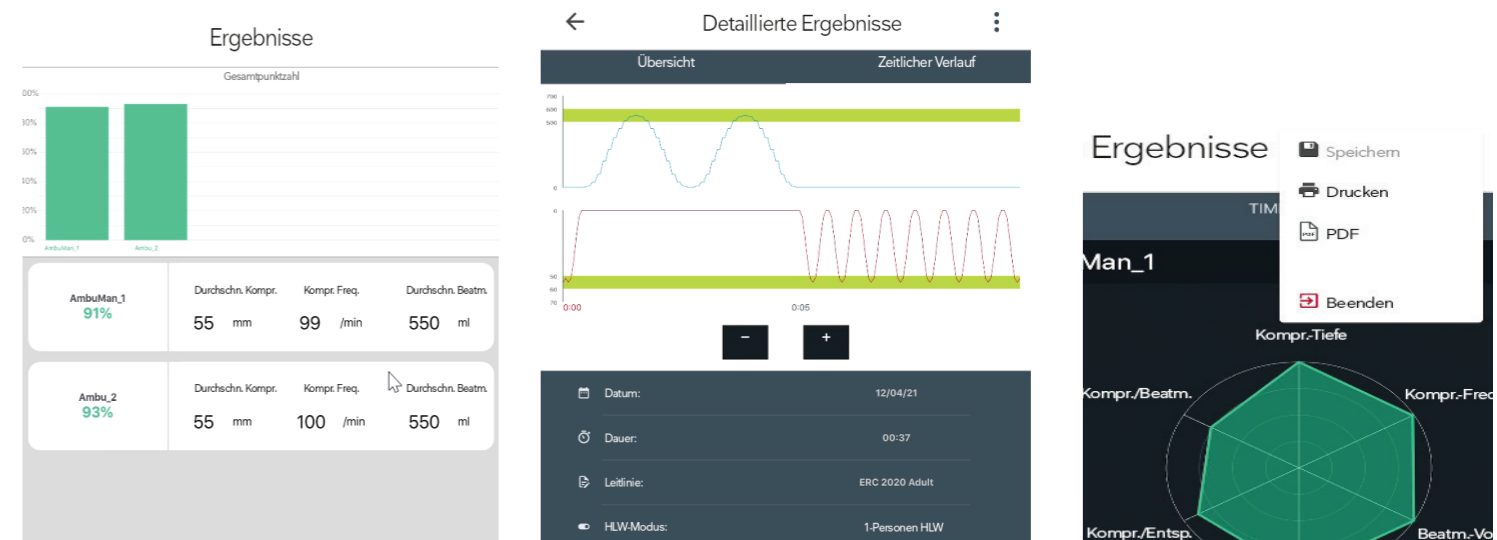

Erhöhen Sie den Spaß am Training!

Ermöglichen Sie Ihren Auszubildenden spielerisch ein schnelles und einfaches Lernen mit der integrierten Wettkampffunktion und treten Sie mit Herzen oder Läufern gegeneinander an.

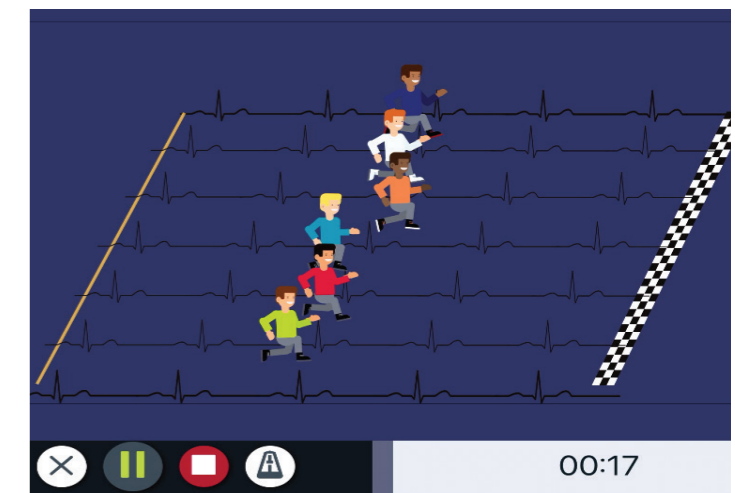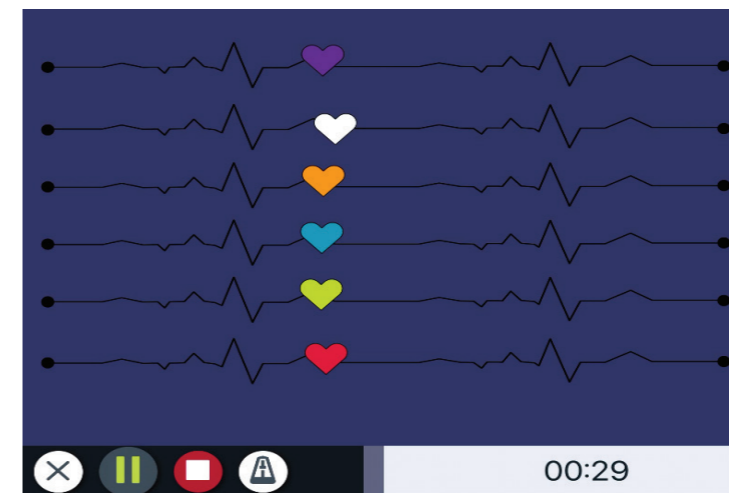



Ambu

iQ

Lerne



HLW-Training



Gespeicherte
Ergebnisse

DIE GESCHICHTE BAHNBRECHENDER IDEEN

Im Jahr 1957 wurde das Ambu Phantom geboren. Das weltweit erste Trainingsgerät - der erste AmbuMan - diente dazu, den ersten Ambu Beatmungsbeutel vorzustellen und seine Funktion zu demonstrieren.

Später erschienen der CPR Pal, der Ambu Simulator und der Intubationstrainer. Weitere 28 Jahre später wurde die erste AmbuMan CPR-Software auf den Markt gebracht.

Von der Innovationskraft der Gründer angetrieben und in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern, wuchs die AmbuMan Familie vom AmbuMan® School über den AmbuMan® Basic, bis hin zur Ambu BLS-Familie und dem AmbuMan® Advanced über die Jahre stetig an.

Die Resultate unserer Bestrebungen reichen von den frühen Innovationen wie dem Ambu-Beutel und den Ambu® BlueSensor™ Elektroden bis hin zu unseren neuesten wegweisenden Lösungen. Mit ständigem Blick auf die Zukunft verfolgen wir unser Ziel, innovative und hochwertige Produkte zu entwickeln, die Ihre tägliche Arbeit positiv beeinflussen.

Ambu hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark und beschäftigt etwa 4.200 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien.

Unser Beitrag für die Umwelt

Einige der ökologischsten Unternehmen weltweit haben ihren Sitz in Dänemark. Diese Tradition inspiriert Ambu.

Ambu hat sich folgende Umweltziele gesetzt: 100% phthalatfreie Produkte bis 2020. 95% PVC-freie Produkte für alle Produkte, die nach 2025 eingeführt werden. Alle Verpackungen sind ab 2025 wiederverwendbar oder recyclebar.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ambu.de/praktikum/bls-trainingsgerate

Ambu

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
ambu.de



BR - iQF - PUB 001093 22 - V02 - 092021 - Ambu GmbH. Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigung verändert werden.