




### Drei Möglichkeiten zur Verwendung des aView 2 Advance Monitors mit dem aCart Compact:

1. Platzieren Sie den Monitor auf die plane Ablagefläche des aCarts, indem Sie den Ständer des aView 2 Advance an der Rückseite des Geräts ausklappen, oder
2. Befestigen Sie den Monitor mit der mitgelieferten Ambu-Halterung an einem Infusionsständer (siehe Gebrauchsanweisung, Abschnitt 4.4), oder
3. Montieren Sie den Monitor auf einer Standard VESA-Montageplatte. Siehe Kurzanleitung unten



### Kurzanleitung für die Montage der Standard-VESA-Platte des aCart Compacts an den aView 2 Advance

1. Identifizieren Sie die VESA-Montage-Schnittstelle auf der Rückseite des aView 2 Advance.

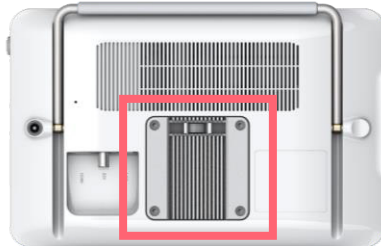


2. Verwenden Sie den Schlitzschraubendreher, um die Schrauben zu entfernen. Es müssen insgesamt vier Schrauben entfernt werden.




3. Wählen Sie vier M4-Schrauben mit der richtigen Länge für die VESA-Montage des aCarts aus. Die Schraubenlänge muss 14-16 mm betragen. **WICHTIG: Die Verwendung längerer Schraubenlängen dringt in den Lithium-Ionen-Akku ein und führt zu Brandgefahr. Die Verwendung kürzerer Schraubenlängen könnte zu einer unsicheren Gerätebefestigung führen.**

Schraubenlänge < 14 mm

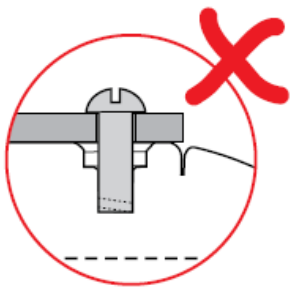

Schraubenlänge 14–16mm

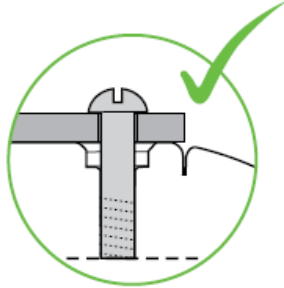

Schraubenlänge > 16 mm



4. Befestigen Sie die VESA-Montageschnittstelle des View 2 Advance Monitors an der VESA-Montageplatte des aCart Compact, indem Sie die Schraubenlöcher ausrichten. Verwenden Sie den Schraubendreher (Phillips Nr. 1) und vier Schrauben mit einer Länge von 14-16 mm, um die VESA-Montageplatte sicher zu befestigen.

